

Snabbstartsguide: ThermoChem™ HT-2000

Innan du installerar engångsartiklarna ska du utföra följande steg

1. Lås alla hjul på enheten.
2. Kontrollera att vattenbadet är tomt och att dräneringsventilen är stängd.
3. Fyll det interna vattenbadet med 2 liter destillerat eller sterilt vatten.
4. Se till att följande återanvändbara komponenter finns tillgängliga:
 - 2 vattenledningar till värmeväxlaren
 - Temperatursond för värmeväxlare
 - 3 eller 4 förlängningskablar till patientens temperatursond
5. Montera behållarens fäste på instrumentets nedre högra skena.
6. Fäst upphängningsanordningen för droppåsar på stängen till höger om monitorn.
7. Sätt i och fäst nätkabeln i enheten.
8. Anslut till ett vanligt eluttag och slå på strömmen.

Montering av engångsartiklar


För mer detaljerad information se bruksanvisningen och/eller IFU som medföljer engångssatsen

- 1** Öppna engångsförpackningen. Placera sterila komponenter på en säker plats.

- 2** Skjut in värmeväxlaren i fästet.
 - Rikta in kanten på värmeväxlarens sida mot spåret på fästets insida.
 - Se till att sidan med värmeväxlarens bubbelfälla är utåt.

- 3** Anslut värmeväxlarens vattenledningar. Dra kragen bakåt och:
 - tryck på de smala ändarna på värmeväxlaren
 - tryck de breda ändarna på instrumentet.
 - Se till att ledningarna är helt på plats.

- 4** Sätt behållaren i fästet och kontrollera att slangen inte är vriden.

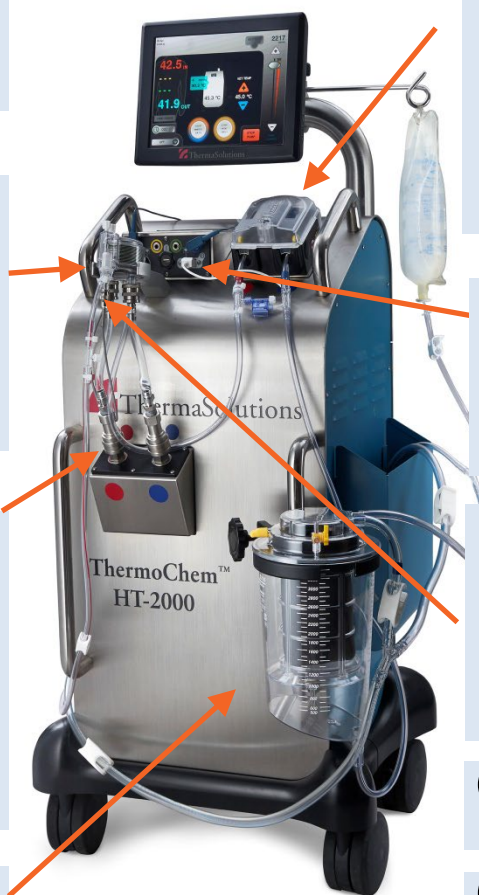

- 5** Öppna pumpdörren. Linda slangen runt rullpumpens huvud.
 - Matcha rött med rött och blått med blått.
 - Se till att slangen sitter ordentligt fast i pumpklämmorna. Stäng pumpdörren.

- 6** Anslut ena änden av den vita engångstryckssensor till en luerkoppling efter pumpen. Anslut den andra änden till instrumentets anslutningspanel.

- 7** Anslut den återanvändbara grå temperatursonden för värmeväxlaren.
 - För in sondändan i botten på värmeväxlarens vred och anslut till instrumentets anslutningspanel.


- 8** Kläm fast och stäng alla dräneringsledningar.

- 9** Häng upp 2 liter steril vätska på droppstängen. Fyll på behållaren.
 - Kläm fast påfyllningsledningarna efter påfyllning.

Före uppvärmning

1 Välj "STARTA VATTENBAD" för att starta värmaren.

2 Öka "STÄLL IN TEMPERATUR" till önskad temperatur.

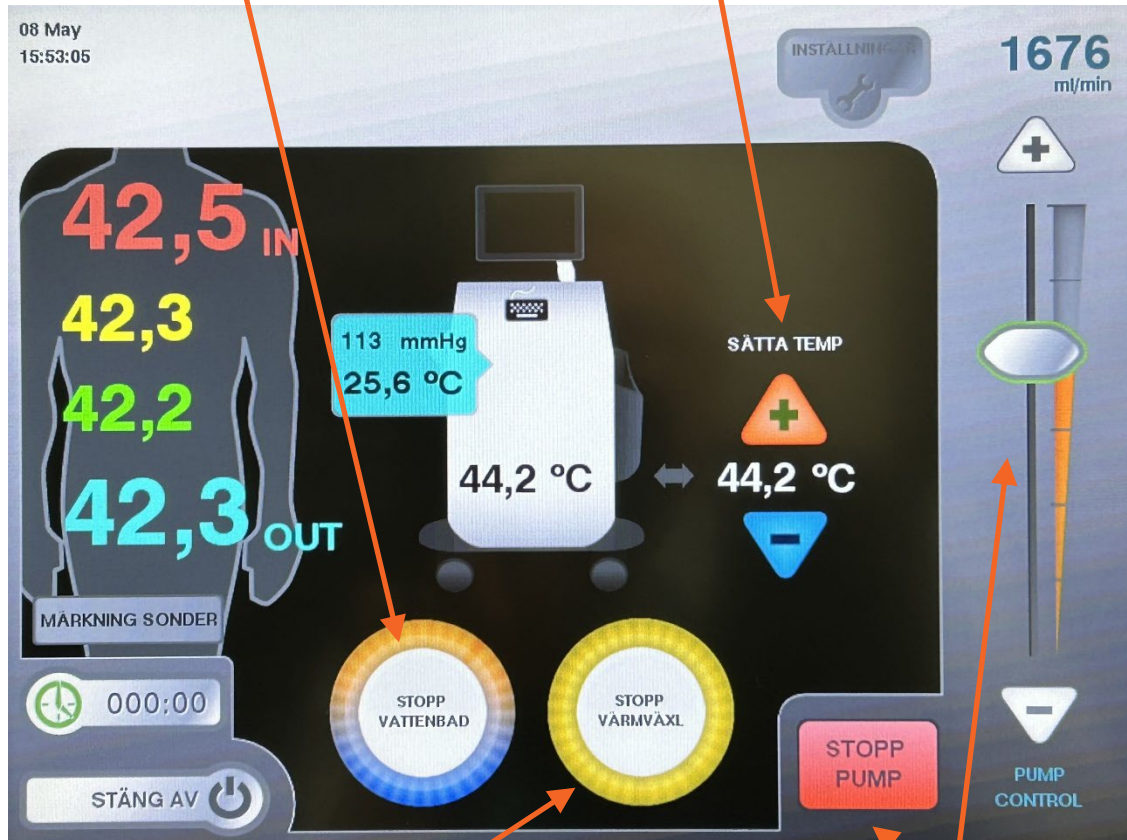

3 Välj "STARTA VÄRMEVÄXLARE" för att starta värmeväxlarens vattenflöde.

- Avlägsna luftbubblor från värmeväxlarens vattenbadssidan. Delvis inverterad värmeväxlare med slangar monterade.

4 Välj "STARTA PUMP" och ställ in patientpumpens hastighet till ca 1000 ml/min med hjälp av skjutreglaget.

Inleda behandling

För mer fullständiga instruktioner följ bruksanvisningen och/eller IFU som medföljer engångspaketet

1. Använd steril teknik för att föra in inflödes- och utflödesartiklar samt temperatursonder till operationsfältet.
2. Stoppa pumpen och för över steril slang till operationsfältet.
3. Kläm fast in- och utflödesledningarna innan du separerar eller klipper av den sterila slingan med slangar.
4. När du är klar lossar du inflödesledningarna och startar pumpen för att försiktigt fylla patientens kavitet.
5. När patientens kavitet är fylld, lossa på utflödeslangarna för att starta returflödet till behållaren.
6. Justera pumpens hastighet för att bibehålla rätt patient- och behållarnivåer.